

あぶ コロナを炙り出せ

コロナはどこに潜んでいるのか？
—見えないから恐怖が広がるのです—

Break コロナ

ぶっ飛ばせ コロナ

ウイルス感染拡大防止中

- 身近な所でコロナ感染者が出たら大変。
- 熱が出て、風邪なのか、コロナに感染したのか心配。
病院に行っても、すぐにコロナの検査はしてくれません。
会社は休もうか、家族とどう接すれば良いのか、
考えているうちに悪化したら・・・。
- 芸能人やスポーツ選手、政治家で有名な人も命まで落した人も居ます。
- 飲食店、コンビニ、スーパー、集会場、役所、
タクシー・運送・鉄道、事務所、工場など、どこで感染するのか
分からないので心配しています。



そんな皆様に良いお知らせ！！

大切な家族や社会を守るため、
気になっただけで検査を！

新型コロナウイルス PCR検査 唾液摂取用検査キット

希望小売価格

3,800円(税別)

【ご注意事項】●当サービスでお知らせする検査通知から推測できるのは「ご提供いただいた唾液から取り出した検体の中に、新型コロナウイルスが存在するかどうか」についてののみです。また、PCR検査の特性として、一定確率で、検体にウイルスが存在したとしても存在しない状態を示したり、逆に検体にウイルスが存在しなかったとしても存在する状態を示したりする場合があります。仮に高リスク(唾液の中に新型コロナウイルスが存在することを示すような検査状況)であると通知されたとしても、新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか等については、判断できませんので、お住まいの地域の保健所にご相談くださいますようお願いいたします。●発熱等の症状がある方、濃厚接触者またはその疑いがある方は検査の対象外です。●摂取前は、最低1時間は飲食、喫煙、うがい、歯磨きをしないでください。●消化酵素により、感度が低下する場合があります。また、マウスウォッシュ、のどあめ、のどスプレー、ガム、歯磨き粉には、殺菌作用のあるCPC(塩化セチルピリジニウム)が含まれているものがあり、正しい検査ができない可能性があります。●当PCR検査は唾液を摂取して検査を行うものです。より正確に検査を行うため、摂取した唾液は摂取後、速やかにお送りください。●唾液は無理に出さず、自然に少しずつ出してください。●唾液摂取からご返送までに時間が空いてしまう場合は、発送直前まで冷蔵庫等で冷蔵保存をお願いします。●引火の恐れがありますので、チューブなどを火に近づけないでください。●直射日光や高温多湿の場所、炎天下の車内等に保管しないでください。●水に濡らしたり湿気が多い場所、火気のそばで使用しないでください。●検査キットはお子様やペットの手の届かない所で、使用・保管してください。●保存液が目に入ったり、肌に触れたりした場合にはすぐに水で十分に洗い流し、異常がある場合には専門医に相談してください。●小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。●小さいお子様が誤飲するおそれがあります。万が一飲み込んだ場合には、直ちに医師の診断を受けてください。

大切な家族や社会を守るため、
気になったたらすぐに検査を！

新型コロナウイルス PCR検査 唾液摂取用検査キット

希望小売価格

3,800円 (税別)

RS-CoV-2

いつでも、どこでも
簡単・手軽

※唾液を摂取するだけの簡単な検査です。

唾液摂取後
キットを郵送

送料無料

※返信用封筒付
(料金受取人払郵便)

☆☆PCR検査を行う理由☆☆

□ ■ **【1】いつでも、どこでも簡単・手軽に検査（国内検査）が可能！**

どこからでも郵送頂き、国内検査場で検査を行い検査状況をお客様にお伝えするという仕組み。
検体がPCR検査センター到着後、最短3時間後にメールにて通知いたします。

□ ■ **【2】唾液を摂取するだけ**

唾液を摂取するだけです。痛みを伴わず簡単に検査！

□ ■ **【3】お求めやすい低価格**

専用のPCR検査センターは1日約10万人の検査が可能。今まで高額だったPCR検査がなんと、3,800円(税別)でのご提供が可能となりました。

□ ■ **【4】より正確な検査方法**

唾液を直接、PCR検査にかけるのではなく、一度分離させ核酸抽出しそれからPCR検査にかけるのでより正確な検査報告の実現を可能と致しました。

□ ■ **【5】安心・安全への第一歩**

自粛、三密禁止も、いつまで続ければ良いのでしょうか。
大きな負担を掛けずに、まずコロナの所在を明らかにすることから始めましょう。
個人や家族を守り、事業集団を守り、安心して暮らせる第一歩です。

【お問合せ】 (月) ~ (金) AM9:00~PM5:00

YGグループ/(株)柳生商会&第一環境設備(株)

埼玉県春日部市緑町4-7-17 TEL:048-733-1641/FAX:048-738-8488

E-Mail: n.y@daiichikankyo-setsubi.jp URL <http://www.daiichikankyo-setsubi.jp>